


tech-touch //



TECH-TOUCH2 n'est pas seulement la dernière innovation avec la première interface multifonction complète. C'est aussi le premier dispositif qui peut détecter la profondeur d'aiguille, aidant les professionnelles à contrôler la force pendant le travail.

Spécification

- Ports d'alimentation
- Connecteurs du stylet

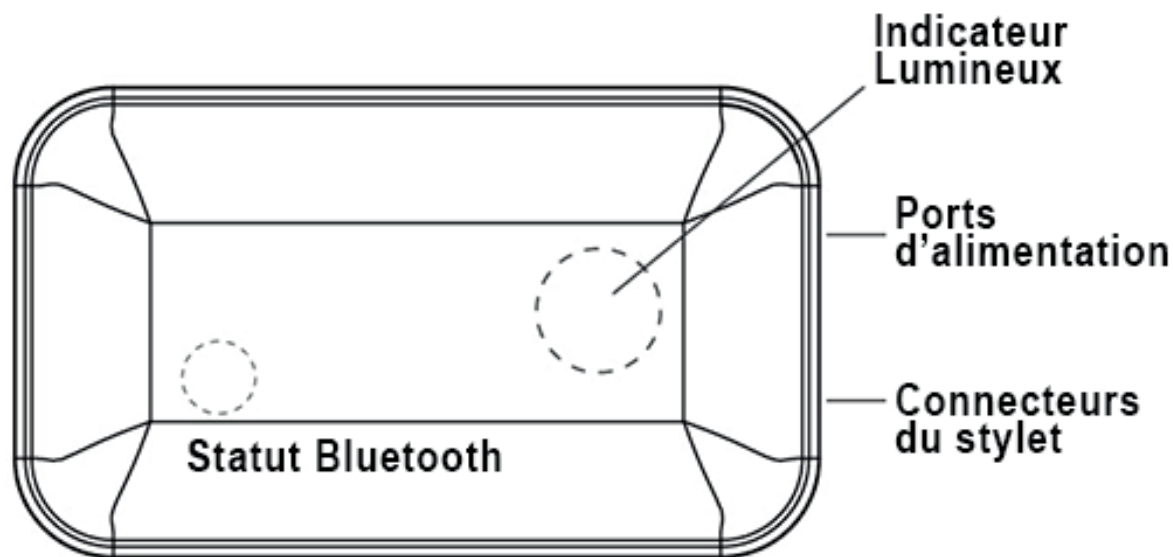


Télécharger l'application
Tech touch




Démarrage

Merci de bien suivre les instructions pour configurer **tech-touch //**

1. Branchez l'alimentation et branchez le cordon de l'adaptateur sur les ports d'alimentation de **tech-touch //**.
2. Raccorder le Stylet sur le connecteur

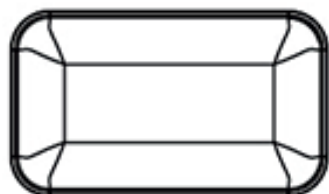

Appareil Bluetooth (TD-201)

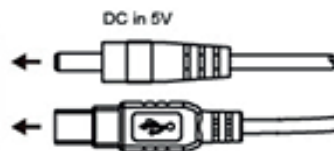

Stylet (TM-201)


Démarrage

Merci de bien suivre les instructions pour configurer votre appareil **tech-touch //**

1. Veuillez activer BLUETOOTH sur votre téléphone mobile
2. Lancer l'application **tech-touch //**

Lancer la recherche bluetooth directement via l'application.

Ne pas connecter le dermographe directement avec le téléphone.

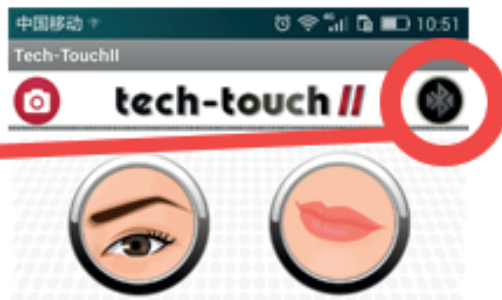


3. L'indicateur lumineux devient rouge et le bleu clignote
4. Lorsque le périphérique est connecté, la lumière bleue cesse de clignoter.


Mode

Veillez sélectionner différents modes selon vos besoins
(Mode de référence: Eyebrow / lip / Eyeliner / Areola / tattoo)

1. Dans le menu, sélectionnez "MODE " pour entrer dans la sélection du mode de procédure.

2. Choisir "EYEBROW  / LIP  / EYELINER  /
AREOLA  / TATTOO " pour démarrer

Note : "FAVORITE " peut être sélectionné par préférence

3. Entrer dans la page de démarrage, sélectionner "ON "

Note : Lorsque le Stylet est allumée, l'indicateur lumineux de l'appareil BLUETOOTH devient orange

Minuteur

Les utilisateurs peuvent configurer le temps en fonction des besoins individuels.

1. Dans le menu, sélectionnez "Timer"



2. Choisir "Countdown"



3. Sélectionnez le temps dont vous avez besoin



4. Une fois la durée de la procédure sélectionnée, le système retourne à la page de menu et le compte à rebours apparaît sur le coin gauche.

Lorsque le temps est écoulé, l'appareil émet trois bips.