



# Notice d'utilisation

## **Pistolet** pour pose de boucles d'oreilles **Stériles**



### ATTENTION CONTRE-INDICATIONS :

Si votre client présente un de ces symptômes, lui conseiller de demander un avis médical :


- Troubles de la circulation,
- Pression artérielle élevée ou faible,
- Antécédents de thrombose ou d'embolie,
- Epilepsie,
- Femme enceinte,
- Diabète,
- Dysfonctionnement du système nerveux,
- Affections de la peau,
- Ecchymose ou hémorragie récente,
- Cicatrices ou chéloïdes,
- Verrues, coupures ou trace d'opération récente.




Ce pistolet est exclusivement réservé à la pose de bijoux d'oreille. Il n'est en **AUCUN CAS** adapté pour percer d'autres endroits que les zones bleutées sur le schéma.

### EN CAS DE DOUTE, NE PAS PERCER

### Contenu de la malette

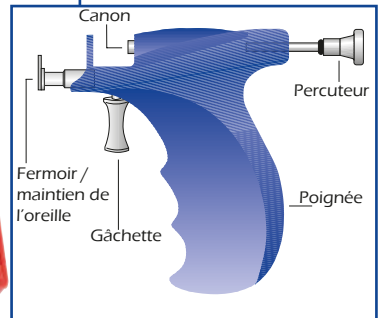

### Contenu du Blister

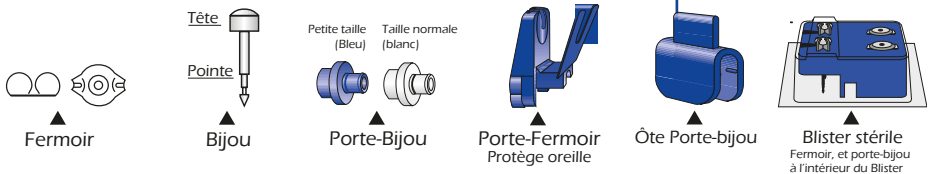

Ce système, **conforme à la norme Européenne** en vigueur, permet la mise en place des bijoux **sans les toucher** directement avec les mains. Les bijoux **CAFLON** sont fabriqués dans un matériau **hypoallergénique** et sont **stérilisés** dans des blisters individuels.

### Mise en place des bijoux

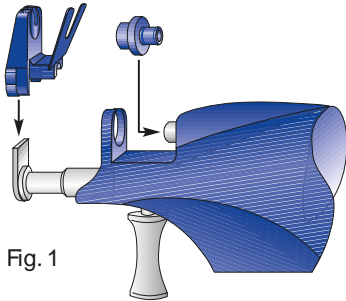


Fig. 1

Mettre en place, avec des gants, le «porte-bijoux» dans le canon ainsi que le «porte-fermoir/protège-oreille» sur l'embout prévu à cet effet. (fig. 1)

Prendre le bloc (toujours avec des gants) et mettre le bijou dans le «porte-bijoux» (fig.2).

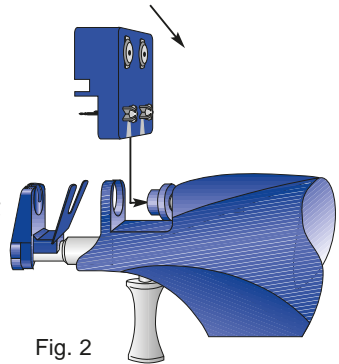


Fig. 2

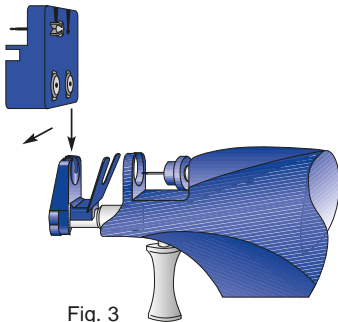


Fig. 3

Ensuite, mettre le fermoir sur le «porte-fermoir» (fig.3).

**Si l'un des bijoux tombe durant la manipulation, prendre un Blister neuf et stérile et jeter le premier.**

Une fois le bijou en place, **tenir le pistolet à l'horizontal** pour éviter que le bijou ne tombe.

**Cette manipulation est assez simple, mais vous aurez sûrement besoin d'un peu de pratique pour réussir à chaque fois.**

## Le piercing de l'oreille

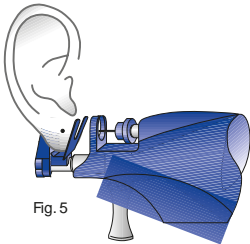


Fig. 5

- Tirer sur le percuteur pour armer le pistolet.  
(Vous pouvez également habituer le client au **bruit du pistolet sans bijou** afin que ce dernier ne sursaute pas lors du piercing.)

- Insérer le lobe dans le «protège-oreille». (fig.5)  
- Appuyer sur la gâchette doucement **jusqu'à mi-parcours**. Le porte-fermoir se rapproche, bloquant ainsi l'oreille.

- **Vérifier l'alignement** avec votre marque de stylo.  
- Tenir le **pistolet à 90°** et avvertir le client qu'il doit rester immobile.

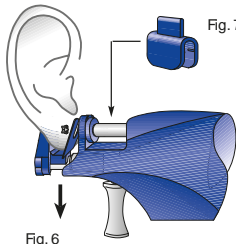


Fig. 6

Fig. 7

- **Appuyer à fond sur la gâchette**,  
- **Attendre 2 secondes et relâcher doucement** la gâchette.

- **Retirer doucement** le pistolet de l'oreille (fig.6).  
- Une fois que le deuxième bijou est inséré, vérifier que le **client est apte à se lever**. Sinon, lui laisser un peu de temps pour se remettre.

- Avant que le client ne parte, lui **rappeler les soins à apporter** pour faciliter la cicrisation.

- Après le percing, enlever le «porte-bijou» ainsi que le «protège-oreille» du pistolet et les **jeter dans une poubelle** prévue à cet effet.

## Eviter les Infections

Précautions à prendre après un piercing :

- **Ne pas jouer** avec les oreilles,
- Ne pas remplacer le bijou avant **6 semaines**,
- **Se laver les mains** avant de toucher le bijou et le **nettoyer deux fois par jour** avec un produit adapté **SANS ENLEVER LE BIJOU**.
- **Ne pas laisser** du savon ou du shampoing sur le fermoir.
- Laisser l'endroit **sec**.
- Ne pas pousser le fermoir contre l'oreille mais **laisser un peu d'espace**. Ce dernier doit être au bout de la tige du bijou.

Des légères douleurs ou démangeaisons peuvent survenir dans les 48H. Au delà, et en cas de rougeur ou gonflement excessif, conseiller le client d'aller voir son médecin. **Ne pas ôter le bijou sans avis médical.**



**ITC - AII4TA2**

18, rue Robert Schuman - 54850 Messein  
Tél : 03.83.56.36.36 - Fax : 03.83.56.36.37  
[www.itcpiercing.com](http://www.itcpiercing.com)