



LINGETTES NETTOYANTES ET DÉSINFECTANTES À LARGE SPECTRE

Incidin™ OxyWipe S

LINGETTE NETTOYANTE ET DÉSINFECTANTE À LARGE SPECTRE D'ACTION

La formulation innovante du produit Incidin™ OxyWipe S combine les effets d'une solution brevetée à base de peroxyde d'hydrogène à un large spectre d'activité.

Produit efficace sur un large panel de bactéries et garantis sans résidus actifs sur les surfaces grâce à une évaporation rapide.

- L'ingrédient actif se décompose en eau et en oxygène
- Désinfectant à action virucide
- Excellente compatibilité avec le matériel
- L'efficacité d'Incidin™ OxyWipe S confirmée pour le liquide libéré par la lingette

Incidin OxyWipe S est approuvé dans l'UE en vertu du RPB (Biocide Product Regulation 528/2012).

- Répond aux critères complets de toxicologie, d'écotoxicologie et d'évaluation de l'exposition du RPB
- Répond aux normes de sécurité les plus élevées, assure un niveau de protection élevé pour la santé humaine et l'environnement
- Assure une conformité durable



*Brevet européen EP1987121

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™

Incidin™ OxyWipe S

LINGETTE NETTOYANTE ET DÉSINFECTANTE À LARGE SPECTRE D'ACTION

EFFICACE

- Désinfectant à action virucide

SÛR

- L'ingrédient actif se décompose en eau et en oxygène
- Excellente compatibilité avec le matériel
- Répond aux critères d'évaluation stricts du RPB

PRATIQUE

- Nettoie et désinfecte en une seule opération
- Prêt à l'emploi

RÉSULTATS MICROBIOLOGIQUES

EFFICACITÉ DU PRODUIT NON DILUÉ	DISPOSITIF MÉDICAL	BIOCIDE (PT02)
Bactéricide selon EN 13727 (2min) / EN 16615 (2 min*)	2 min*	15 min*
Levuricide selon EN 13624 (15min) / EN 16615 (1min*)	15 min*	
Fongicide selon EN 13624 (30min) / EN 16615 (méthode) (5min*)	30 min*	30 min*
Tuberculocide selon EN 14348 (30min) / EN 16615 (méthode) (5min*)	30 min*	30 min* ¹
Mycobactéricide selon EN 14348 (30min) / EN 16615 (méthode) (5min*)	30 min*	
Efficace contre les virus enveloppés selon EN 14476	30 sec*	-- ²
Virucide à spectre limité selon EN 14476 (Adénovirus - 30sec, Norovirus - 15min)	15 min*/**	-- ²
Complètement virucide selon EN 14476	30 min**	30 min** ²

* Conditions propres ** conditions sales

¹ L'efficacité mycobactéricide comprend l'efficacité tuberculocide.
² Seule l'efficacité complètement virucide était applicable selon la norme EN14476 au moment de la constitution du dossier.

UTILISER LES DISPOSITIFS MÉDICAUX ET LES BIOCIDES EN TOUTE SÉCURITÉ

Consultez l'étiquette et les informations sur le produit.

INDICATIONS



Dispositif médical: Lingette de nettoyage et de désinfection à large spectre, prête-à-l'emploi pour les dispositifs médicaux classés non-critiques et semi-critiques.

Biocide: Lingette prête à l'emploi pour la désinfection des surfaces dans les applications de soins de santé.

MODE D'EMPLOI

Dispositif médical: (MDIIB)
Prendre une seule lingette. Mouiller abondamment la surface, en veillant à avec l'ensemble de la surface. Laisser sécher et ne pas rincer. Ne pas réutiliser la lingette car sinon la désinfection n'est plus garantie. Fermer le couvercle après utilisation. Respecter le temps de contact et les conditions pour obtenir l'activité antimicrobienne requise. En cas d'utilisation dans des conditions de propreté, nettoyer la surface au préalable (utiliser une nouvelle lingette à chaque étape). L'utilisation d'une lingette nettoyante et désinfectante ne remplace pas un nettoyage régulier. Ne pas utiliser sur les surfaces sensibles aux agents oxydants comme le marbre, le cuivre ou le laiton, le cuivre ou le laiton. Le respect des instructions d'utilisation du fabricant y compris les informations sur la compatibilité matérielle est obligatoire lors du retraitement de dispositifs médicaux. Désinfection terminale de dispositifs médicaux semi-critiques (comme les sondes & les sondes TEE) : au cas où l'immersion serait impossible, nettoyer le dispositif médical puis désinfecter par essuyage selon la description ci-dessus. Dans ce cas, une fois le temps de contact écoulé, rincer abondamment à l'eau potable.

Tout incident grave lié au dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre..

Biocide:
Le produit est destiné au nettoyage et à la désinfection en une seule étape. Consultez toujours l'étiquette ou la notice avant l'utilisation et suivez toutes les instructions. En cas d'utilisation dans des conditions de propreté : nettoyer la surface en amont. Le produit doit être appliqué sur une surface sèche. Mouiller complètement les surfaces. Après l'utilisation du produit, laisser la surface sécher à l'air. Ne pas rincer après utilisation. Fermer le récipient lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne pas utiliser les lingettes après déshydratation. Jeter le récipient lorsqu'il est vide. Ne pas ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux agents oxydants tels que marbre, le cuivre ou le laiton. Les lingettes usagées doivent être jetées dans dans un conteneur fermé.

Attention: Le produit est classé Biocide et Dispositif médical. Les utilisateurs doivent respecter les temps de contact et les conditions d'emploi correspondantes à l'indication.

COMPOSITION

100 g de la solution d'imprégnation contient :
1,5g Peroxyde d'hydrogène (CAS 7722-84-1)

STOCKAGE

Le produit doit être stocké dans l'emballage d'origine en dessous de 25 ° C dans un endroit frais et sec, hors de la lumière directe du soleil.

Durée de conservation après ouverture : 3 mois.



UNIQUEMENT POUR USAGE PROFESSIONNEL